



# 1200mLカートリッジボトル泡石けん用をご使用の前に

UD-1600は、工場出荷時に手指消毒剤（スプレー）を使用する設定になっています。

石けん液（フォーム）を使用する場合は、以下の手順で製品の設定を変更してください。

## ■ダイヤルの変更

- ①カバーを開けます（取扱説明書P5参照）。
- ②安定した場所に製品を置きます。
- ③図のようにロックボタンを押したまま、ダイヤルを回し[2]に設定します。

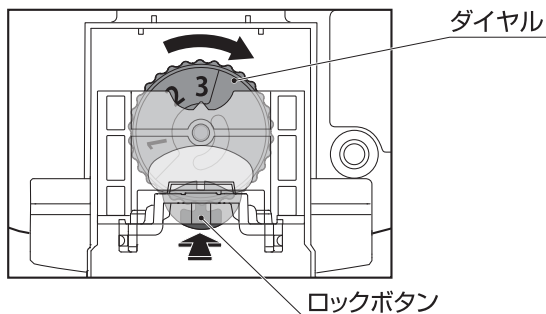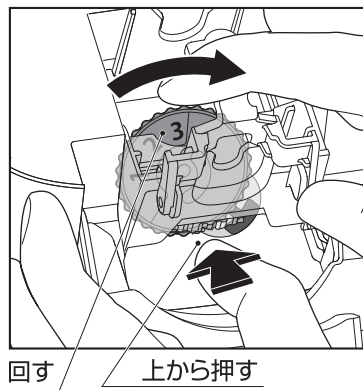

- ④ロックボタンから指を離し、ダイヤルが回らないことを確認します。

使用薬液	位置
石けん液（リキッド）	1
石けん液（フォーム）	2
手指消毒剤（スプレー） 初期設定	3

## 注意

- ダイヤルを無理に回すと、破損する恐れがあります。
- 吐出量を変更するときは、必ず電池を抜いて電源が切れていることを確認してください。
- ロックボタンが真下に来てないときは、取扱説明書P7記載の手順でスライド部品を一度動作させてから、変更を行ってください。

## 仕様

項目	内容
吐出量	石けん液…リキッド:約1mL/回、フォーム:約0.8mL/回
	手指消毒剤…スプレー:約1.5mL/回