



# 「手指消毒用ボトルスタンド」取扱説明書

## 外観図

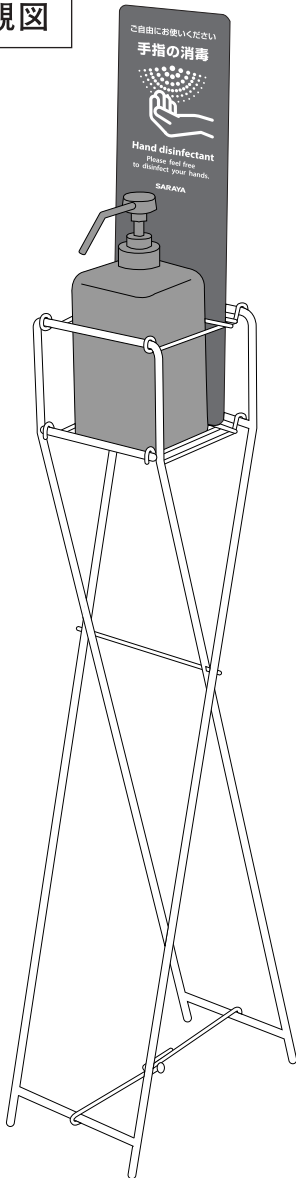

## 各部名称

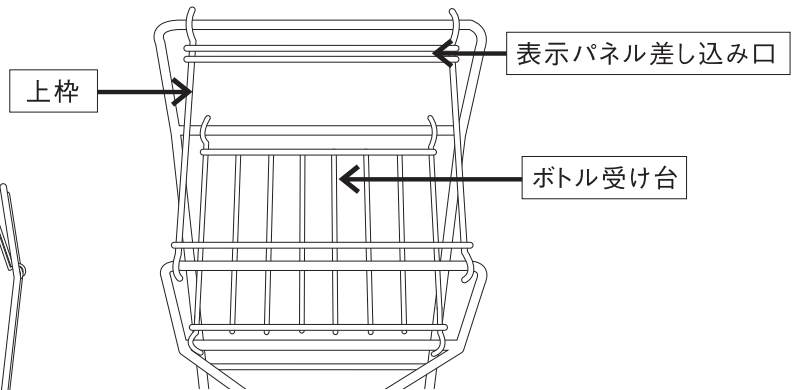


1. 包装を外しセット準備してください。


2. 本体フレームを開き、ボトル受け台をセットします。

3. 次に上枠をセットします。

4. 表示パネル差し込み口側が後ろとなる様に、位置をご確認いただき、ボトル・表示パネルをセットしてください。  
※表示パネルは表裏両面印刷しております。お好みのデザインをお使いください。

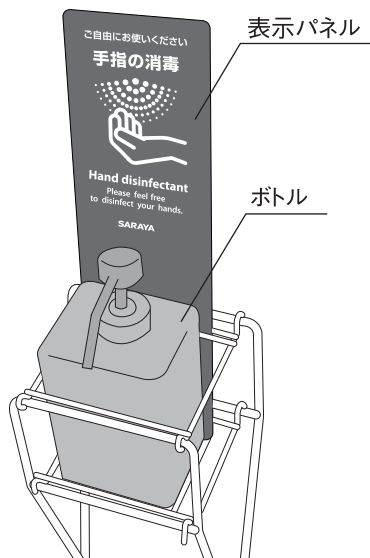

5. 収納時は上枠、ボトル固定枠の順にセット解除し、最後に下部ストッパーを上へ引き上げて収納してください。

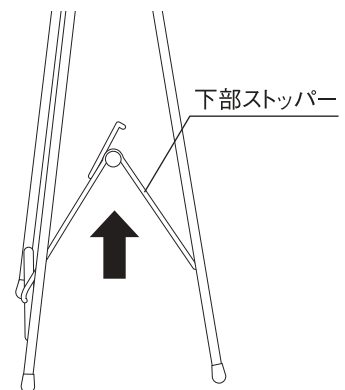

- 【注意】
- 床が丈夫で水平なところに、確実に据え付けてください。
  - ボトルスタンドによりかかりますと転倒する恐れがありますのでご注意ください。
  - 薬液を噴射しておりますと、薬液で床がぬれることがあります。特にワックスやニスなどコーティング剤を床に施しているところは床を変色させることがありますので、ご注意ください。