



## 感染予防は手洗いから・・・手洗い方法の確認に

# 手洗い チェッカー LED

専用ローションを手についた汚れに見立てて、専用ライト下で光らせます。  
適切な手洗いが実施できているか確認できます。  
専用ライトはLEDを採用していますので、従来の蛍光灯タイプと  
比較して電池寿命が約4倍長持ちします。



洗い残しが光ります

## セット内容

① 手洗いチェッカー 本体

② ブラックライトLED

乾電池は付属しておりません。  
単3乾電池×4本は別途お買い求めください。

③ 手洗い用石けん液  
シャボネットユ・ムP-5  
250mL 1本

④ 手洗いチェッカーローション 230mL 2本

コンパクトに  
収納できます

単品でも取り扱っています。

## ブラックライトLED

手洗いチェッカーLED付属専用ライトの単品商品です。  
既にご購入の「手洗いチェッカー」にも使用可能です。



※本商品には乾電池は同梱されていません。単3乾電池×4本は別途お買い求めください。


## 手洗いチェッカーの使用方法



専用のローションをワンプッシュ  
(約1mL)手に取り、まんべん  
なく塗り広げます。



手洗い用石けん液を使って、  
普段通りの手洗いをを行います。

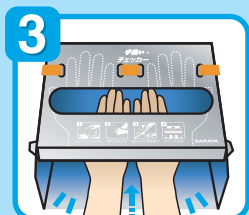

専用ライトを取り付けた本体に  
手を入れます。



洗い残した部分が光ります。  
手の甲 手のひら

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
手洗いチェッカーLED	1セット	1	41336	49-87696-41336-8
ブラックライトLED	—	1	41357	49-87696-41357-3
手洗い用石けん液 シャボネットユ・ムP-5	250mL ポンプ付	24	23259	49-87696-23259-4
手洗いチェッカーローション	230mL ポンプ付	20	41337	49-87696-41337-5

### 安全にご使用 いただくために

- ご使用の前には同梱の各種説明書や製品表示をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- その他、製品に関する資料等のご請求についてはお問い合わせください。

- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
- 掲載製品の詳細については、取扱店・専門施工店または当社にお尋ねください。
- 記載内容は2024年3月現在のものです。

### サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8  
TEL.06-6797-2525 <https://www.saraya.com/>