



たたいて氷冷!リフレッシュ! アイスパックR 瞬間冷却剤

ガツンと簡単
すぐ冷却!



屋外作業時に



スポーツ・レジャーに



眠気覚ましに



打撲・炎症などに



ガツンと簡単
すぐ冷却!

事前に準備不要! すぐに使えます。

成分 硝酸アンモニウム、水

使用方法 ※温度は急激に下がりますので身体にあてる際は必ずタオル・ハンカチ等に包んでご使用ください。

内容量 120g

1 製品の中に入っている水袋の位置を確認してください。

2 平らな場所に置き、水袋の部分を手で適度な強さで叩いてください。



3 水袋を割ると顆粒状の薬剤が水に溶けて、冷却が始まります。

使用上の注意 ●開封しないでください。●本品は食べられません。●万一袋が破れて内容物が目に入った際は、こすらずに水でよく洗い流し、飲み込んだ場合は水などで口をすすぐなどの応急処置をしてください。内容物が皮膚についた場合は水・石けんで洗い流してください。いずれの場合も速やかに医師に相談してください。●冷却専用です。加熱しての使用はしないでください。●長時間、直接皮ふにあてたりすると凍傷を起す恐れがあります。布・タオルなどで包み、温度を調節してご使用ください。●鋭利なものや突起物への接触は十分に注意してください。●小児が使用する際は、保護者の方から十分にご指導ください。●廃棄の際は、開封せず、各自自治体の定める方法に従って処理してください。

水袋が破れにくい場合は、水袋の上に手を当て、強く押し潰してください。

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
クールリフレ アイスパックR	120g	48	42433	49-87696-42433-3

■製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
■写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
■掲載製品の詳細については、取扱店または当社にお尋ねください。
■記載内容は2019年1月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 <https://www.saraya.com/>