



# PE ロンググローブ

Polyethylene Disposable Long Gloves



## トイレ掃除に最適な 60cmロングタイプ

**食品衛生法適合品**  
(厚生労働省告知第370号)




50枚入

内エンボス加工

### 特長

- ポリエチレン製の肘まですっぽり覆える60cmのロングタイプ
- 左右兼用で経済的
- ラクラク着脱できるゴムなしタイプ
- 内エンボス加工でズレ防止

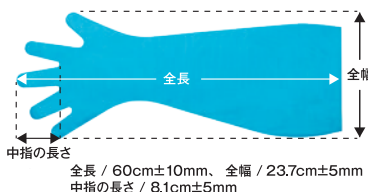

全長 / 60cm±10mm、全幅 / 23.7cm±5mm  
中指の長さ / 8.1cm±5mm


### 用途

- 掃除や作業時の手や衣服の保護に。さまざまな場面でご使用いただけます。

### 着脱方法


※手袋を外すときは、汚染面が素手や衣服に触れないように注意し、廃棄後は手指衛生をしっかりと行うことが重要です。

#### 着け方

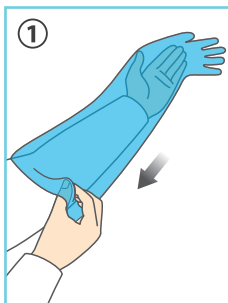

袖口の部分を  
つかんで装着する


#### 外し方

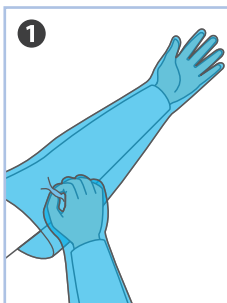

片方の手袋の  
袖口をつかむ




手袋を裏表逆  
になるように外す

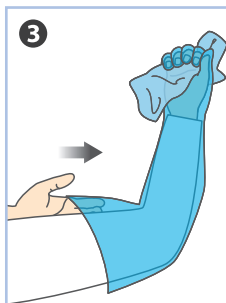

手袋を外した手を  
反対の手袋の袖口に  
差し込む



裏表逆になるように  
外す

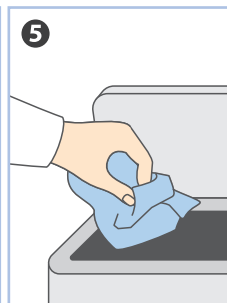

外した手袋はすぐに  
廃棄する

| 品名          | 内容量 / 規格  | 1梱入数 | 商品コード | JANコード           |
|-------------|-----------|------|-------|------------------|
| PEロンググローブ 青 | 50枚フリーサイズ | 20   | 50981 | 49-87696-50981-8 |

- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
- 掲載製品の詳細については、取扱店または当社にお尋ねください。
- 記載内容は2025年1月現在のものです。

### サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8  
TEL.06-6797-2525 <https://www.saraya.com/>