



ペダルを踏むだけで薬液を吐出・噴射します。

足踏み式ディスペンサー  
HC-8000

## 特長

## 多種多様なボトルに対応

サラヤの多種多様な形状のディスペンザブル容器やカートリッジボトルを装着し、お使いいただけます。

## 石けん液



## 速乾性手指消毒剤



## ハンドケアローション



## 電源不要でどこでも設置

電源が不要で設置場所を選びません。ペダルを踏むだけで手を触れることなく手洗い・消毒などができます。

## 使用手順パネルで手指衛生の啓発

本体上部に使用手順パネルを設け、わかりやすく使い方を案内しています。また、薬液ボトルをそのままセットしますので薬液名、残量を確認することができます。\*使用ボトルによっては見えない場合もあります。

## 安心・安全な設計

スタンドの脚部分は安全に配慮したフラット構造です。また、スタンド部分は耐久性に優れたステンレスを採用しています。

## 簡単にできる高さ調整

スタンドの高さを1,155mm~1,555mmの範囲で簡単に調整することができます。

## お手入れも簡単

トレイは脱着式になっていますので簡単に清掃することができます。

簡単にできる  
高さ調整ペダルを踏んで  
薬液を吐出




	スタン型 電源不要	石けん 泡状/液状	消毒 噴射/ジェル状	ハンドケア 乳液状
--	--------------	--------------	---------------	--------------

商品コード 41824

W270mm × D326mm × H1,155~1,555mm

# 使用方法をわかりやすくパネルでお伝えします。

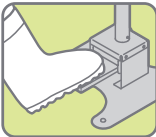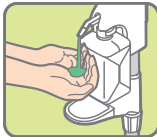


## 手洗い

- ① ペダルを踏むとノズルから石けん液が吐出します。
- ② 石けん液を、手のひらに受けてください。
- ③ よくあわ立てて手の甲、指の間、指先を洗ってください。

手洗い用パネル

## 手指消毒

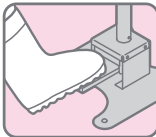- ① ペダルを踏むとノズルから速乾性の消毒液が噴射します。
- ② 指先を立てて消毒液を、手のひらに受けてください。
- ③ 手の甲、指の間、指先に乾くまで擦り込んでください。

手指消毒用パネル

※パネルは製品に同梱されています。

### 使用薬液例

手洗い用石けん液 医薬部外品  
**シャボネットユ・ムP-5**  
 1kg ポンプ付

香料無添加。手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。



速乾性手指消毒剤 指定医薬部外品  
**ウィル・ステラVH**  
 1L噴射ポンプ付

幅広いウイルス・細菌に作用する手指消毒剤です。



指定医薬部外品  
**アルペット手指消毒用α**  
 1L噴射ポンプ付

食品添加物にも使用されている成分を配合した手指消毒剤です。



ハンドケア保湿ローション <化粧品>  
**プライムローション**  
 480mL扁平ポンプ付


クロルヘキシジングルコン酸塩、ベンザルコニウム塩化物などの手指消毒剤の残留抗菌作用を妨げません。




※他の薬液もごさい。弊社、担当者にご確認ください。

仕 様	
項 目	内 容
名 称	足踏み式ディスペンサー
型 式	HC-8000
外 形 寸 法	W270 × D326 × H1,155~1,555 mm
製 品 質 量	約4.6kg (梱包、付属品および薬液は除く)
材 質	本体カバー(パネル)…… ポリプロピレン(PP) ボトル受け…………… ポリアセタール(POM) 支柱…………… ステンレス(SUS304) 支柱高さ調整ナット…… ポリアセタール(POM) 架台(ペダル)…………… ステンレス(SUS304) トレー…………… ポリプロピレン(PP)
使用環境温度	5~35℃ (薬液に適切な流動性が保たれていること)
使用環境湿度	20~85% (結露なきこと)
使用薬液*	当社指定の薬液

※ 使用薬液は、当社指定の薬液をお使いください。  
 他社の薬液を使用した場合、トラブルが生じる恐れがありますのでお使いにならないでください。

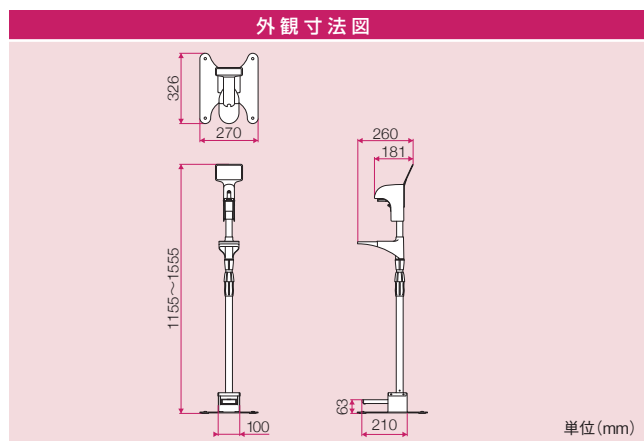

品 名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
足踏み式ディスペンサー HC-8000	本体	1	41824	49-87696-41824-0



**安全にご使用  
いただくために**

- ご使用の前には同梱の各種説明書や製品表示をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ディスペンサーをご使用の際は当社指定の薬剤をご使用ください。指定以外の薬剤をご使用になると思いがけない事故やトラブルが生じる恐れがありますので、ご使用にならないでください。
- その他、製品に関する資料等のご請求についてはお問い合わせください。

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。  
 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。  
 ■ 掲載製品の詳細については、取扱店・専門施工店または当社にお尋ねください。  
 ■ 記載内容は2021年7月現在のものです。

## サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8  
 TEL.06-6797-2525 <https://www.saraya.com/>