

いのちをつなぐ

**SARAYA**

商品の詳しい情報は  
こちらから▶



# サラヤ ニトリルグローブ ソフトフィット

NITRILE GLOVES SOFTFIT

一般医療機器 届出番号27B1X00120000500  
非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70976000  
歯科用手袋 JMDN70911000

食品衛生法適合品(厚生省告示第370号)

極薄素材を採用し、  
しなやかな  
フィット感を実現



指先すべり止め加工で作業しやすい

伸縮性・耐久性にすぐれ、  
手にぴったりフィット

パウダーフリー・ラテックスフリー

左右兼用で、無駄なく使える

# 衛生的に取り出せる箱設計

手首側から1枚ずつ取り出せる箱設計で  
指先部分に触れることなく衛生的に取り出すことができます。



- 250枚入りの大容量!
- 当社従来品の200枚入りの箱サイズに250枚を梱包。
- 空箱廃棄量が約20%削減され、箱の交換頻度も低減します。

## 用途

ラテックス手袋のような“しなやかさ”、細かな作業に適した“フィット性”、バリア性能に優れた“耐久性”を兼ね備えたニトリル手袋ですので、業務用として幅広い用途でお使いいただけます。

## 性能

### 【物理的特性】

	老化前	老化後
引張り強度 (Mpa)	≥16	≥18 [ASTM D6319]
最大伸長度 (%)	≥500	≥400 [ASTM D6319]

水密性(ピンホール)試験 AQL1.0 [ASTM D6319]

ASTM規格:世界最大の工業規格。米国材料試験協会により規定された材料に関する試験法。日本のJIS規格に相当。  
AQL:合格品質水準。許容できる不良品率を表しており、数値が低いほど高品質であることを示す。  
EN規格:欧州規格。欧州における法規制の技術基準。

### 【耐薬品性】

37%ホルムアルデヒド 60分以上浸透せず [EN 374-3]  
40%水酸化ナトリウム 480分以上浸透せず [EN 374-3]

## 手袋サイズ表

サイズ	XS	S	M	L
全長 (mm)	≥240			
掌幅 (mm) ±5mm	75	85	95	105


## 仕様

厚み	
指先 (mm)	≥0.06
掌 (mm)	≥0.05

## 着脱方法

### 着け方

### 外し方

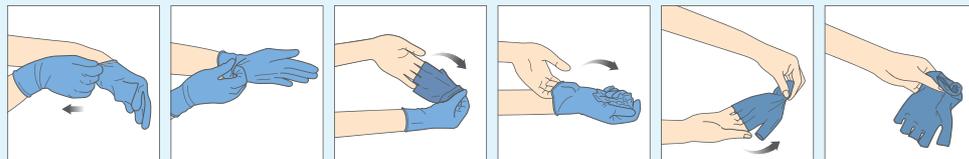

- ① 手首の部分をつかんで装着する
- ② 片方の手袋の袖口をつかむ
- ③ 手袋を裏表逆になるように外す
- ④ 裏表逆になるように外す
- ⑤ 外した手袋はすぐに廃棄する

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
サラヤニトリルグローブ ソフトフィット XS ホワイト	250枚	10	50984	49-87696-50984-9
サラヤニトリルグローブ ソフトフィット S ホワイト			50985	49-87696-50985-6
サラヤニトリルグローブ ソフトフィット M ホワイト			50986	49-87696-50986-3
サラヤニトリルグローブ ソフトフィット L ホワイト			50987	49-87696-50987-0
サラヤニトリルグローブ ソフトフィット XS ブルー			50988	49-87696-50988-7
サラヤニトリルグローブ ソフトフィット S ブルー			50989	49-87696-50989-4
サラヤニトリルグローブ ソフトフィット M ブルー			50990	49-87696-50990-0
サラヤニトリルグローブ ソフトフィット L ブルー			50991	49-87696-50991-7

- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
- 掲載製品の詳細については、取扱店または当社にお尋ねください。
- 記載内容は2019年7月現在のものです。

## サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8  
TEL.06-6797-2525 <https://www.saraya.com/>