

いのちをつなぐ

SARAYA

GUD-500-PHJ

薬液交換・補充

- 1) 薬液の交換・補充
- 2) 完了



本コンテンツは、サラヤ株式会社・東京サラヤ株式会社ならびに関係会社における教育ツールの一環として制作されたものであり、許可の無い使用および転載、その他一切の権利を侵害する行為を禁止します。

GUD-500-PHJ

薬液の交換・補充



本体内の薬液が無くなった時や、使用用途を変更する時などに交換します。



本体の天面にある鍵穴に付属のカギを差し込み、カバーを持ちながら手前に引いて開きます。※カバーは重みで手前に開くため、必ず手で持ちましょう。



カバーを開いたら薬液ボトルを入れ、開けた時と同じようにカバーを閉めます。
※ノズルはカバーの穴を通るように、正面に向けてください。



カバーを元に戻して、最後に“カチッ”と音がするまで押し込みます。
※手をはさんだりしないように気をつけましょう。

GUD-500-PHJ

完了

いのちをつなぐ

SARAYA

以上で作業は終了です。

作業スペースを清掃し、忘れ物に注意しましょう。