

いのちをつなぐ

SARAYA

ミュークリーンⅡ

日常メンテナンス

ファンフィルターの清掃

- 1) ファンのフィルターのクリーニング
- 2) お手入れの際の注意事項
- 3) 完了



本コンテンツは、サラヤ株式会社・東京サラヤ株式会社ならびに関係会社における教育ツールの一環として制作されたものであり、許可の無い使用および転載、その他一切の権利を侵害する行為を禁止します。

ムークリーンⅡ

ファンのフィルターのクリーニング




電源スイッチを「切」にして、作業してください。

ミュークリーンⅡ

ファンのフィルターのクリーニング



ストラップに指をかけて引っ張り、ファンのカバーを取り外します。

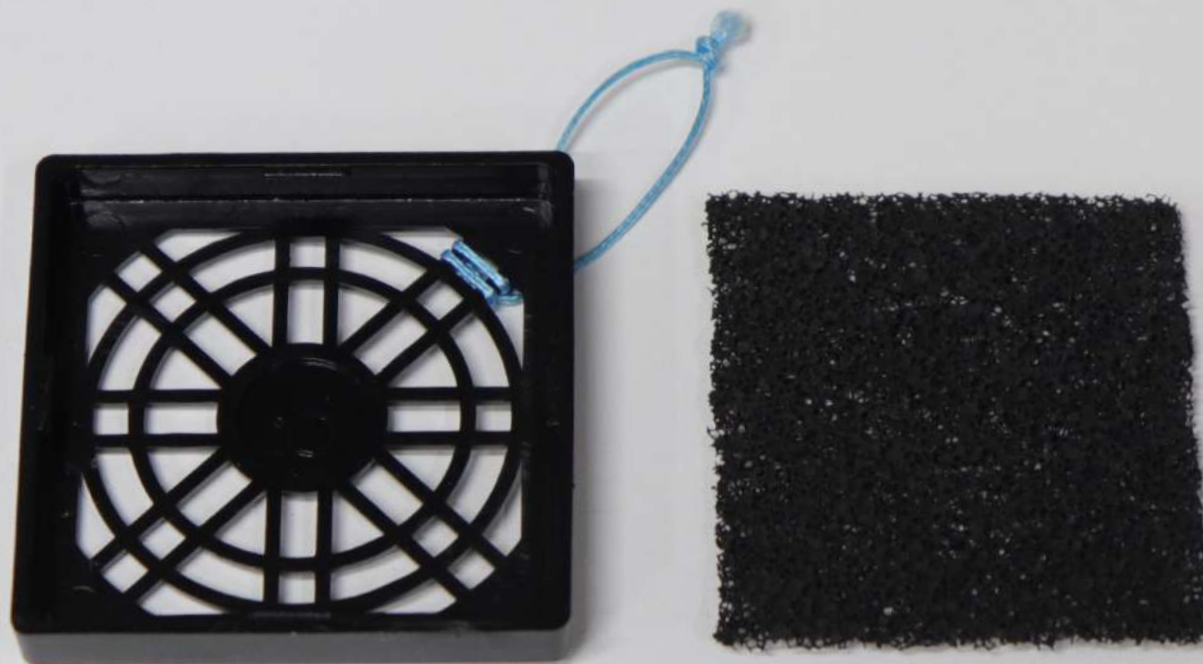

フィルターを外して、洗剤は使わずに各パーツを水洗いしてください。

ミュークリーンII

ファンのフィルターのクリーニング

↑△注意↑
吐出ホースは大きく
動かすと破損します。
取扱いには十分
!ご注意ください!



ここに手を
つけてください



完全に乾いたら、本体のファンに取り付けて使用してください。



お手入れの際の注意事項

- お手入れの際は、本体の電源スイッチを『切』にして、コンセントから電源プラグを抜き、止水栓を閉じた状態でおこなってください。
- 本体はやわらかい布、または化学雑巾でカラ拭きしてください。汚れが落ちにくい場合は、うすい中性洗剤を布につけて拭いてください。

ミュークリーンⅡ

完了

いのちをつなぐ

SARAYA

以上で作業は終了です。

作業スペースを清掃し、忘れ物に注意しましょう。