

いのちをつなぐ

SARAYA

各種薬液

泡ポンプノズルの取付方法

- 1) 泡ポンプノズルの取付
- 2) 完了



本コンテンツは、サラヤ株式会社・東京サラヤ株式会社ならびに関係会社における教育ツールの一環として制作されたものであり、許可の無い使用および転載、その他一切の権利を侵害する行為を禁止します。



ノズルと、本体の接続部分を覆うチューブが付属されているか確認します。

各種薬液

泡ポンプノズルの取付



ノズルよりも先に、本体にチューブを取り付けます。



ノズルをチューブの中に差し込みます。



本体とノズルの接続部分に隙間ができないように、しっかりと差し込みます。

各種薬液

泡ポンプノズルの取付



吐出の際、接続部分から液漏れがなければ完成です。

各種薬液

完了

いのちをつなぐ

SARAYA

以上で作業は終了です。

作業スペースを清掃し、忘れ物に注意しましょう。