

顔認証手指衛生システム

## プロテゲートモニター

## 据付説明書

お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでも確認いただける場所に保管してください。  
製品についてご不明な点は、当社「お問い合わせ窓口」までお問い合わせください。

## 梱包内容

【プロテゲートモニター用スタンド】

- スタンド本体 ..... 1セット
- スタンド ..... 1
- スタンド架台 ..... 1
- スタンド蓋 ..... 1
- ワッシャ付なべ小ネジ (M4×16) ..... 3
- 皿小ネジ (M3×6) ..... 4

【プロテゲートモニター用タブレット】

- タブレット本体 ..... 1
- コネクタ&工具 ..... 1セット
- コネクタ (予備) ..... 2
- 六角レンチ ..... 1
- 六角星形ドライバー (T15) ..... 1
- プロテゲートモニター用ACアダプター ..... 1
- UD-600PG ..... 1
- サラヤACアダプター (UD-600PG用) ..... 1

※プロテゲートモニター用タブレットを単独でご購入の場合、  
プロテゲートモニター用スタンド、UD-600PG、  
サラヤACアダプターは含まれません。

## 目次

ページ

|                        |    |
|------------------------|----|
| 安全上のご注意                | 1  |
| 施工をされる前に               | 2  |
| 取り付けに必要な工具             | 2  |
| 各部の名称                  | 3  |
| ・プロテゲートモニター用タブレット      |    |
| ・プロテゲートモニター構成          |    |
| 取り付け方法                 | 5  |
| ・スタンドの取り付け             |    |
| ・UD-600PGの取り付け         |    |
| ・プロテゲートモニター用タブレットの取り付け |    |
| ・電源接続                  |    |
| 自動ドア連動機能について           | 10 |

ご使用前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。  
 ここには、ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守り  
 いただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

|   |                                      |         |   |                 |  |
|---|--------------------------------------|---------|---|-----------------|--|
|  <b>警告</b> | 誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの    | 禁止・強制記号 |  | 行為を禁止する記号です。    | 例:   |
|  <b>注意</b> | 誤った取り扱いをしたときに軽傷、または家屋・家財などの損害に結びつくもの |         |  | 行為を強制、指示する記号です。 | 例:   |

## 設置上の注意

### 警告



本紙で指示した規格以外での設置は行わないでください。

火災、けが、事故、故障の原因になります。



火気や火花が出る器具の近くでの使用、保管、放置はしないでください。

火災、やけど、故障などの原因となります。



湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口近くなど、温度が急激に変化する場所では使用しないでください。

感電、火災、やけど、けがなどの原因になります。



火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。

火災、やけど、けがなどの原因になります。



段差のない水平な場所に設置する。

転倒による、けが、破損、故障などの原因になります。



直射日光の当たる場所、高温になる場所での使用、保管、放置はしないでください。

誤作動、変形、故障、火災などの原因となります。



本製品は防水/防塵性能は有していません。

水などの液体が掛かる場所、湿気、ほこり、砂の掛かる場所での使用、保管、放置はしないでください。

感電、火災、やけど、けが、故障などの原因になります。



寒い場所から暑い場所への移動など、急激な温度変化をさせないでください。

感電、火災、やけど、故障などの原因になります。



ディスペンサーを連動させる際は、ディスペンサーの「取扱説明書」に従い、設置してください。

感電、火災、やけど、けが、故障などの原因になります。

- 電源はAC100V (50/60Hz)、最大消費電力は8.5Wです。必ずこれに適した配線を行ってください。
- 電源コンセントは2個口をご用意ください。
- 電源コードの長さは約1.8mです。電源コンセントは、これに適した位置で、なおかつ水の掛からない位置に設置してください。
- 施工完了後はお客様に本紙の内容をよくご説明ください。

## 取り付けに必要な工具


### ■お客様にご用意いただく工具

- プラスドライバー
- 精密ドライバー


### ■同梱している工具

- 六角レンチ
- 六角星形ドライバー


## プロテゲートモニター用タブレット

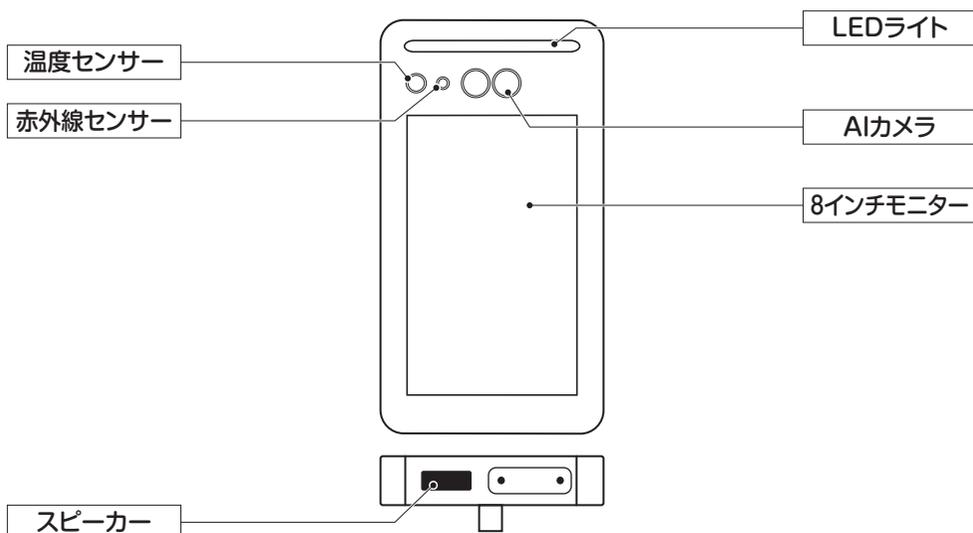

**ケーブル** ※スタンド側の電源ケーブルから派生しているケーブル1本は使用しません。


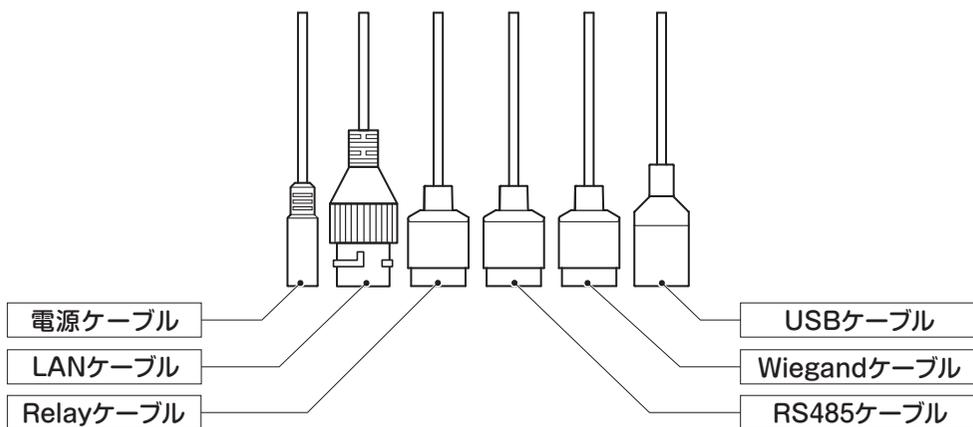


プロテゲートモニター構成

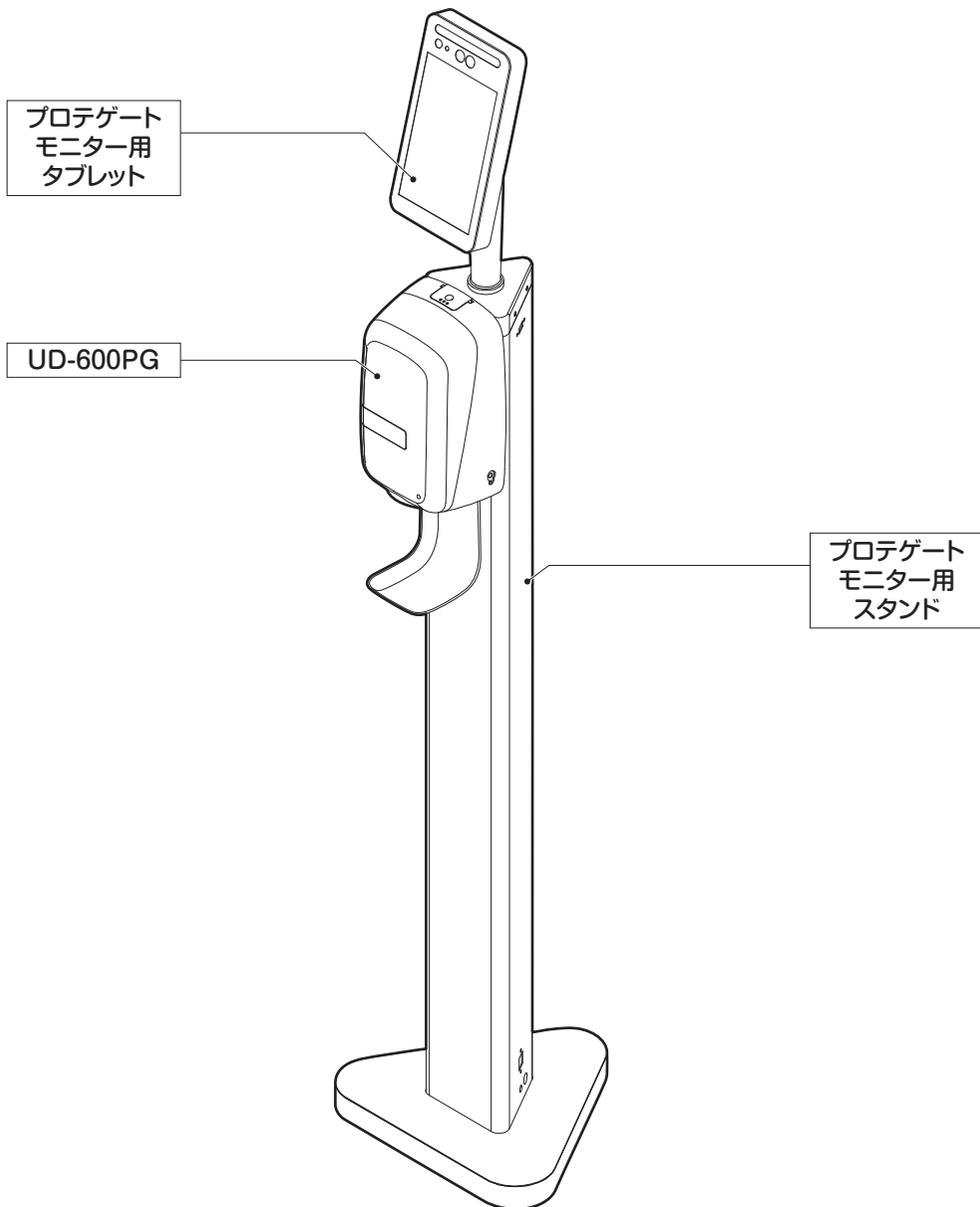

## スタンドの取り付け

- ① 梱包からスタンド蓋、スタンド本体、架台を取り出します。
  - ② ワッシャ付なべ小ネジ (M4×16) 3本は、スタンド本体に付いているものを一旦外してください。
  - ③ 本体を架台にセットしてから、架台の下からワッシャ付なべ小ネジ (M4×16) 3本で本体と架台を固定します。
  - ④ スタンド蓋とスタンド本体を留めている皿小ネジ (M3×6) 4本は、一旦外してください。
- ※ スタンド蓋はプロテゲートモニター用タブレット取り付け時に組立するため、プロテゲートモニター用タブレットの取り付け (P7) をご参照ください。

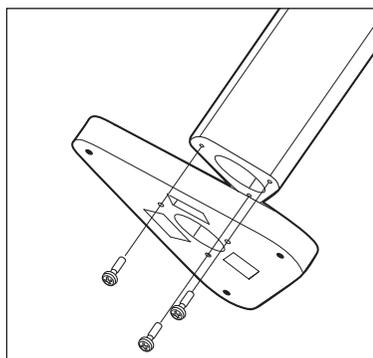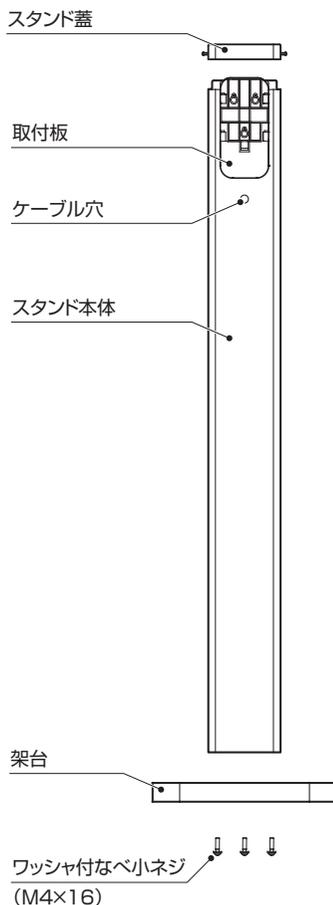

## UD-600PGの取り付け

- ①ディスペンサー背面から出ているケーブルをスタンドのケーブル穴に通します。



### 注意

- ケーブルを穴に通す際に指を挟まないようにご注意ください。
- ケーブルを引っ張りすぎないようにご注意ください。

- ②ディスペンサーをスタンド上部の取付板に付けます。

- ※詳しくはディスペンサーの取扱説明書、「本体の取り付け」をご参照ください。


- ③ディスペンサーをセットしてから電源ケーブルを装着します。

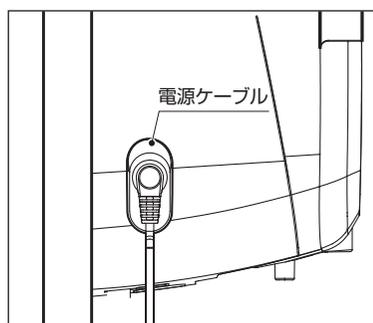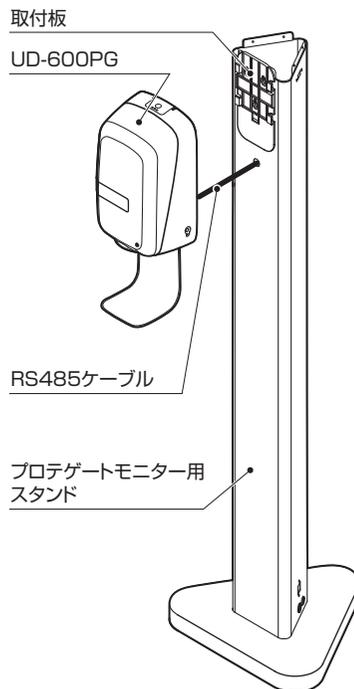

UD-600PG左側面


プロテゲートモニター用タブレットの取り付け

①アルミスタンドからナットを一旦外します。

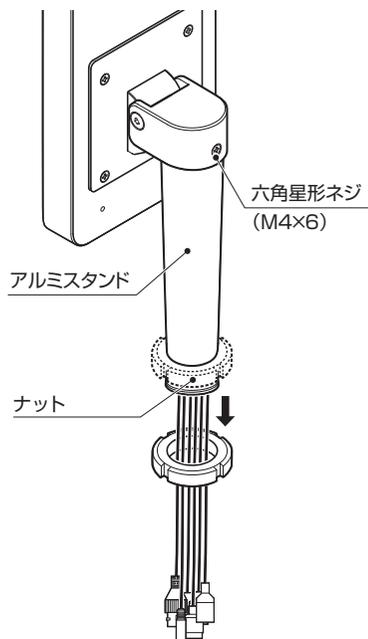


②アルミスタンドから出ているケーブルをスタンド蓋を通してからナットを通します。

③スタンドの裏からナットでアルミスタンドに取り付けます。

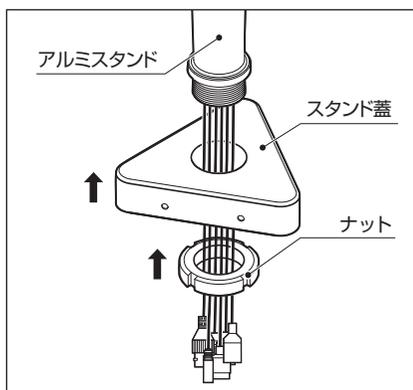


④スタンドの中から電源ケーブル、LANケーブル、USBケーブル及びRS485ケーブルを出します。

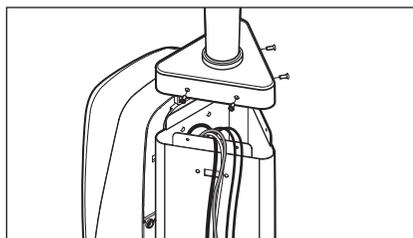


⑤それぞれのケーブルをタブレットから出ている同規格のケーブルに接続します。

※Wiegandケーブルは、本品の基本仕様では使用しませんので、接続先はありません。

※スタンド側の電源ケーブルから派生しているケーブル1本は、本品の基本仕様では使用しませんので、接続先はありません。

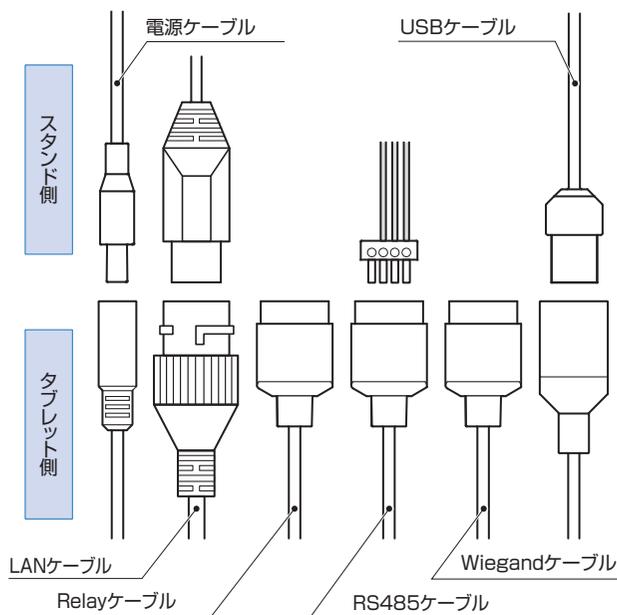

⑥プロテゲートモニター用タブレット組品をスタンドにセットしてから4本の皿小ネジ (M3×6) で固定します。

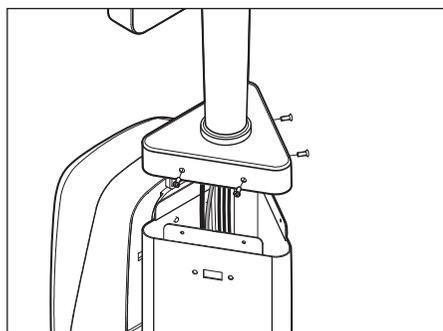

## 電源接続


- ①プロテゲートモニター用タブレット用DCジャックに、プロテゲートモニター用タブレットに同梱のACアダプターを差し込んでください。
- ②UD-600PG用DCジャックに、サラヤACアダプターを差し込んでください。

### 注意

規格が異なるため、ご注意ください。

プロテゲートモニター用タブレット用電源規格：12V3A

UD-600PG用電源規格：6V1A

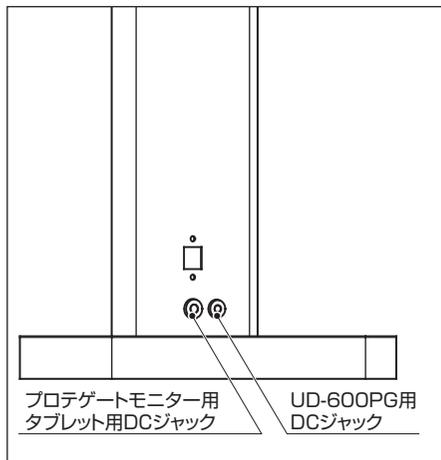

この機能は、本製品と自動ドアを連動させ、プロテゲートモニターで消毒を行わないと自動ドアが開かないようにする機能です。

## 注意

自動ドアへの接続は、プロテゲートモニター自動ドア連動ユニットに同梱している取扱説明書に沿って、取付けてください。  
※プロテゲートモニター自動ドア連動ユニットはオプション品です。

## 商標について

- 本据付説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。
- 各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重致します。

お問い合わせ窓口

**サラヤ株式会社**

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8

TEL.06-6797-2525 URL.<https://www.saraya.com/>

**電話受付:平日**(土日および祝祭日、弊社休日を除く) **9:00~18:00**

- お問い合わせ窓口では、製品のご使用方法やメンテナンスに関するお問い合わせ、最寄りのサービス拠点のご案内を承っております。