

いのちをつなぐ

SARAYA

UD-1600

薬液が噴射しない時の対処方法

- 1) カバーの開閉方法
- 2) 対処方法
- 3) 完了



本コンテンツは、サラヤ株式会社・東京サラヤ株式会社ならびに関係会社における教育ツールの一環として制作されたものであり、許可の無い使用および転載、その他一切の権利を侵害する行為を禁止します。

UD-1600

薬液が噴射しない時の対処方法

カバーの開閉方法



鍵を本体上部の鍵穴に差し、カバーを支えながら手前へ開きます。

UD-1600

薬液が噴射しない時の対処方法




お湯を扱う際は、
やけどをしない
ように注意して
ください。

ノズルの先端のみを約2分間お湯(約70~80℃)に浸します。

UD-1600

薬液が噴射しない時の対処方法

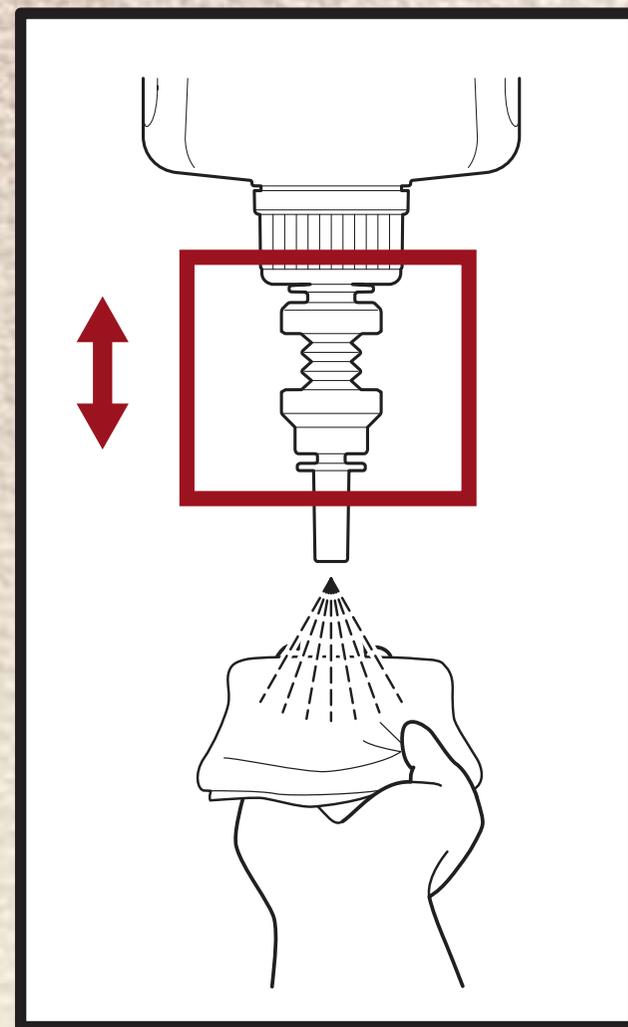

手動でノズルのポンプ部分を上下に動かし、噴射状態が正常か確認します。

UD-1600

薬液が噴射しない時の対処方法



ノズルの噴射穴を
針金等の硬いもの
で掃除しないで
ください。

消毒液噴射タイプのカートリッジボトルやスプレーの場合、噴射穴の拡大や部品の破損に繋がる恐れがあるので、上記の様な処理は絶対に行わないでください。

UD-1600

完了

いのちをつなぐ

SARAYA

以上で作業は終了です。

作業スペースを清掃し、忘れ物に注意しましょう。