

いのちをつなぐ

SARAYA

UD-1600

薬液吐出量変更方法

- 1) 薬液ストッパーの開け方
- 2) 薬液ボトルの装着
- 3) 薬液ボトルキャップの取外し
- 4) 薬液ストッパーの戻し方
- 5) 完了



本コンテンツは、サラヤ株式会社・東京サラヤ株式会社ならびに関係会社における教育ツールの一環として制作されたものであり、許可の無い使用および転載、その他一切の権利を侵害する行為を禁止します。

UD-1600

薬液吐出量変更方法

カバーの開閉方法




鍵を本体上部の鍵穴に差し、カバーを支えながら手前へ開きます。

UD-1600

薬液吐出量変更方法



薬液吐出部に吐出量調整ダイヤルがあります。

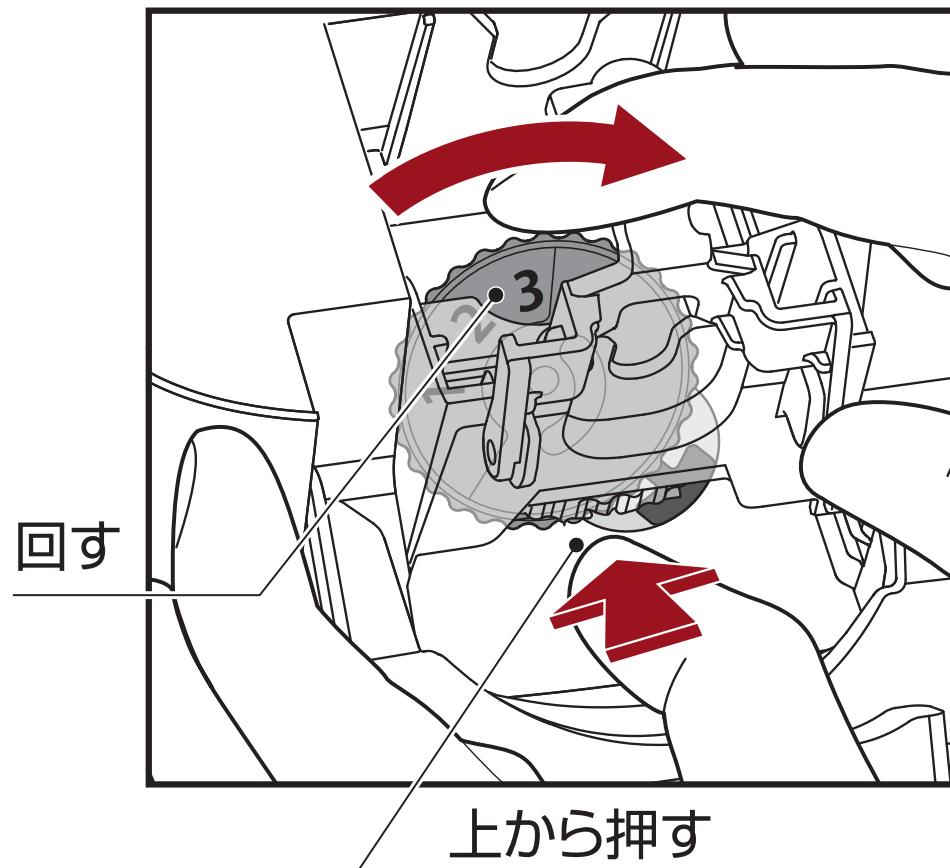

※ロックボタンを押しながらでないとダイヤルは回りません。

ロックボタンを押させながらダイヤルを回します。

※ロックボタンを押しながらでないとダイヤルは回りません。

使用薬液	位置
石けん液 (リキッド) 手指消毒剤 (ジェル)	1
手指消毒剤 (スプレー) 初期設定	3

※ダイヤル2は使用しません。

ダイヤル1→石けん液(リキッド)・手指消毒剤(ジェル)

ダイヤル3→手指消毒剤(スプレー)・初期設定

UD-1600

完了

いのちをつなぐ

SARAYA

以上で作業は終了です。

作業スペースを清掃し、忘れ物に注意しましょう。