

いのちをつなぐ

SARAYA

UD-1600

薬液交換方法

- 1) カバーの開閉方法
- 2) 薬液交換方法
- 3) 完了



本コンテンツは、サラヤ株式会社・東京サラヤ株式会社ならびに関係会社における教育ツールの一環として制作されたものであり、許可の無い使用および転載、その他一切の権利を侵害する行為を禁止します。



カバーの開閉方法



鍵を本体上部の鍵穴に差し、カバーを支えながら手前へ開きます。

UD-1600

薬液交換方法


-  Do not refill while the bottle is inside the dispenser.
-  Keep upright to prevent leakage from bottle cap.



ストッパーを外し、薬液ボトルを取り出してください

UD-1600

薬液交換方法

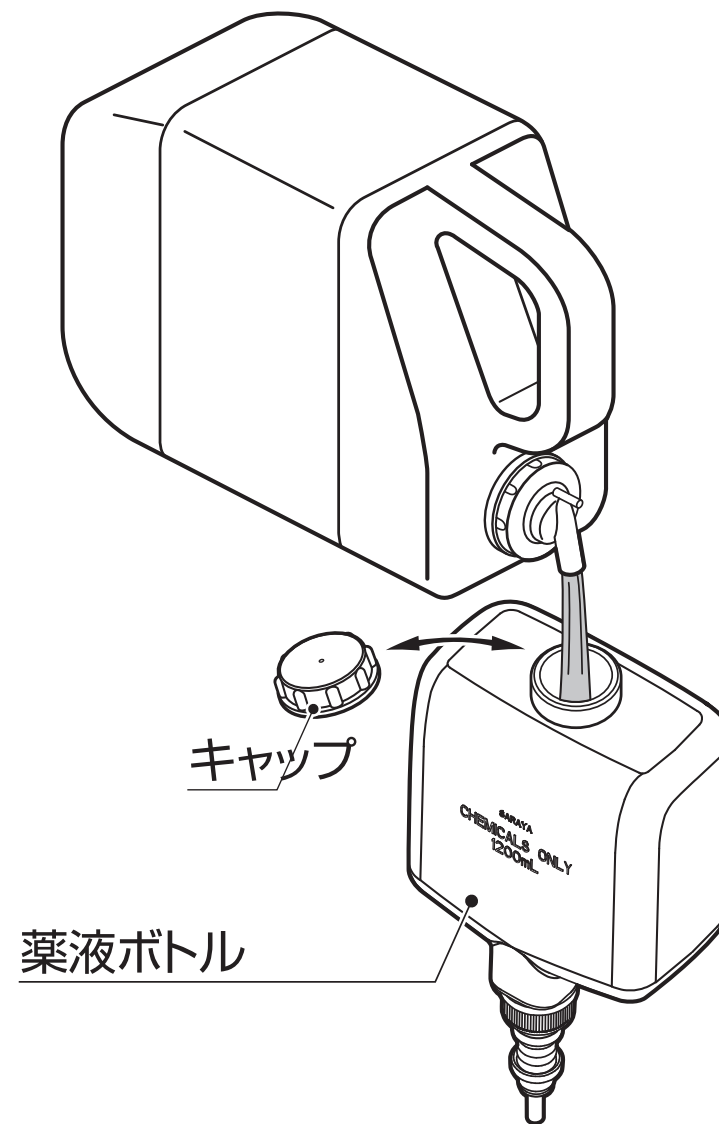

薬液ボトル上部のフタを外し、薬液を補充してください

UD-1600

薬液交換方法

- Do not refill while the bottle is inside the dispenser.
- Keep upright to prevent leakage from bottle cap.

● 緑点灯 — 1 薬液満
● 赤点灯 — 2 薬液満
● 赤点灯 — 薬液切れ

緑点灯
赤点灯

薬液ボトルを本体に設置し、ストッパーでロックしてください

UD-1600

完了

いのちをつなぐ

SARAYA

以上で作業は終了です。

作業スペースを清掃し、忘れ物に注意しましょう。