

いのちをつなぐ

SARAYA

コンパクトピュアスター CP-180

薬剤の交換手順

- 1) 薬剤の交換
- 2) 完了



本コンテンツは、サラヤ株式会社・東京サラヤ株式会社ならびに関係会社における教育ツールの一環として制作されたものであり、許可の無い使用および転載、その他一切の権利を侵害する行為を禁止します。




電解原液について

※薬液は、消耗品です。

商品名: MM6B
容量: 1リットル

薬液を準備します。 ※希釈して使用しない。他の薬剤を混合しない。こぼれた時は、十分に洗い流す。

ロック状態 ▶▶▶ 解除状態

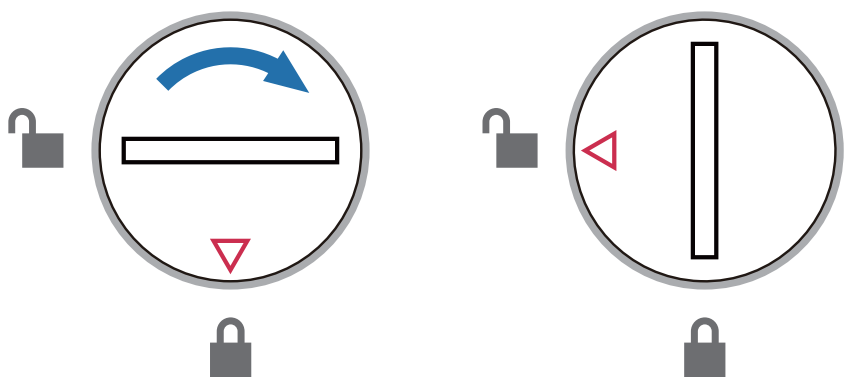

フロントパネルをはずす。 ※電源スイッチを「オフ」にしてから作業する



空になったボトルをはずす。 ※空容器の廃棄は各自治体の廃棄方法に従う

コンパクトピュアスター CP-180

薬剤の交換



ボトルキャップ




ボトルキャップを新しいボトルへ差し替える。 ※ボトルキャップを捨てない



ボトルを取り付ける。

- ※薬液が飛び出すので薬液ボトルは強く掴みすぎない
- ※ボトルキャップとノズルの間にすき間がないように取り付ける

解除状態 ▶▶▶ ロック状態

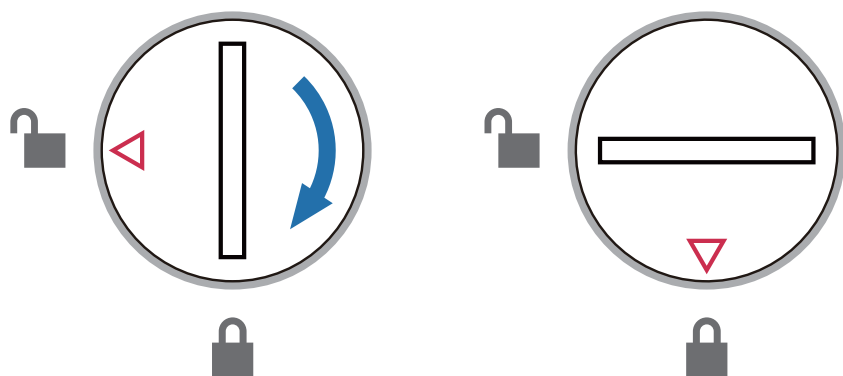

フロントパネルに取付け、ロック状態に戻して、完了です。

- ※器具の腐食、周辺環境の腐食の原因になるので、こぼれた時十分に洗い流す
- ※器具の腐食、周辺環境の腐食の原因になるので、液だれした時は十分に拭き取る

いのちをつなぐ

SARAYA